

# Productinformatie - Handleiding - Gebruiksaanwijzing

## SH Duo RVS Smeltketel



**SELLACQ**HOLLAND  
Nipkowweg 11 8501 XH JOURE

T +31(0)513-499657  
E info@sellacq-holland.nl  
I www.sellacq-holland.nl

Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden.

**Art.nr. 8699**

**Lees voor ingebruikname de handleiding aandachtig door. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.**

### Productinformatie

De SH Duo RVS Smeltketel werkt volgens het Au-Bain-Marie systeem, d.w.z. dat het te verwarmen product in een dompelbus met heet water wordt verhit. Het water in deze bak wordt d.m.v. een thermostaat-geregeld-element op een variabel ingestelde temperatuur gehouden van 30-90°C.

### Installatie

1. Plaats de bak altijd op een stabiele ondergrond.
2. Plaats de RVS dompelbussen.
3. Controleer of het apparaat nog uit is geschakeld, dus de thermostaat nog op nul staat.
4. Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met 230Volt.
5. De bak is klaar voor ingebruikname.

### Ingebruikname

1. Vul de bak met voldoende water totdat de gevulde dompelbussen net niet gaan drijven. Hoe meer water er in de bak zit, des te beter de warmte overdracht om de paraffine te laten smelten.
2. Schakel de thermostaat in op de gewenste temperatuur (ca. 70-80°C) en wacht tot de paraffine volledig is gesmolten.
3. Tijdens het verwarmen brandt het oranje lampje.

### Opmerking!

Controleer regelmatig de hoeveelheid water in de bak en voorkom hiermee droog koken! Hoe meer water, des te

beter de warmte overdracht. Bij lange tussenposen van gebruik, de temperatuur terugzetten naar 60°C, dit om de kwaliteit van de paraffine te behouden en de apparatuur te sparen. Het apparaat is geschikt voor langdurig, continue gebruik.

Gebruik de smeltbak nooit voor oneigenlijk gebruik. Dit voorkomt beschadigen en verkort de levensduur. Met oneigenlijk gebruik vervalt tevens de garantie.

### Schoonmaak

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Om de dompelbussen schoon te maken is het verstandig deze al zo leeg mogelijk te hebben.
3. Giet het laatste restant paraffine uit de dompelbussen en bewaar dit in een wegwerpbakje die hitte bestendig is. Uit dit bakje is het (gestolde) restant paraffine later weer in de bus te doen.
4. De dompelbussen zijn met poetspapier eenvoudig te reinigen wanneer ze nog warm zijn.
5. Wanneer de dompelbussen goed schoon zijn kan men ze nog met een sopje extra gaan reinigen.
6. Spoel het sopje wel goed weg en droog alles grondig voor opnieuw ingebruikname.
7. De smeltbak is na verwijdering van de dompelbussen leeg te gieten en uit te boenen.
8. Hierna is de bak weer klaar voor ingebruikname.

Indien de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd vul dan voldoende water bij en laat het apparaat afkoelen. Schroef het grijze afdekdopje aan de voorzijde los en druk de rode reset schakelaar goed in. De

ketel is nu klaar voor ingebruikname.

### Specificaties

Lengte	680mm
Breedte	370mm
Hoogte	680mm
Vermogen	1000Watt
Spanning	230Volt
Thermostaatinstelling	30-90°C
Variabele indeling	✓
Maximaal thermostaat	✓


### Garantie

Op de smeltbak heeft u 2 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Dit geldt uitsluitend voor onderdelen, niet voor arbeidsloon. Bij storingen kunt u contact opnemen met uw leverancier teneinde met de originele onderdelen de storing op te laten heffen.

**Waarschuwing: aangezien het hier gaat om het verwarmen van een vloeistof, dient bediening van de smeltbak uitsluitend te geschieden door ter zake kundig personeel.**

Het toestel voldoet aan de EU richtlijnen 73/23 EEC en 89/336 EEC alle technische wijzigingen voorbehouden.

### Elektrisch schema

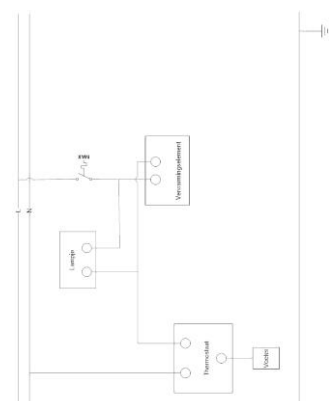

Lees altijd de handleiding alvorens u het apparaat in gebruik neemt.